

Стіл операційний МТ600 (механіко-гідравлічний, рентген-прозорий)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 257600 грн

Артикул: F0485

Операційний стіл "БІОМЕД" МТ600 —
універсальний рентген-прозорий
механіко-гідравлічний стіл з
нирковим валиком та матрацом з ефектом
пам'яті

<p data-start="192" data-end="671">Операційний стіл "БІОМЕД" МТ600 — це багатофункціональний універсальний рентген-прозорий операційний стіл з механіко-гідравлічним приводом, призначений для безпечного, точного та стабільного позиціонування пацієнта під час проведення широкого спектра хірургічних втручань. Стіл використовується в операційних відділеннях загальної, торакальної та абдомінальної хірургії, акушерства і гінекології, урології, травматології, оториноларингології та інших хірургічних галузях.

<p data-start="673" data-end="971">Станина та телескопічна тумба столу виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує високу механічну міцність, корозійну стійкість та тривалий термін експлуатації. Конструкція столу є повністю автономною та не залежить від електроживлення, що гарантує безпеку й надійність роботи у будь-яких умовах.

<p data-start="973" data-end="1288">Верхня частина столу (ложе) є рентген-прозорою та складається з секції для голови, центральної секції (сидіння), спинної секції та двох секцій для ніг. Швидкоз'ємні рентген-прозорі опори для рук забезпечують зручність позиціонування пацієнта та повну сумісність із рентгенівськими апаратами типу С-дуга.

<p data-start="1290" data-end="1582">Матрац виготовлений з сучасного матеріалу з ефектом пам'яті, рівномірно розподіляє навантаження та підвищує комфорт пацієнта під час тривалих оперативних втручань. Матеріал матрацу водонепроникний, антистатичний, стійкий до дезінфекційних засобів і легко очищується після використання.

<p data-start="1584" data-end="1816">Стіл оснащений чотирма антистатичними колесами великого діаметра, дві з яких є поворотними, що забезпечує легке переміщення в межах операційної. Надійна гальмівна система гарантує фіксацію та стабільність столу під час операції.

<p data-start="1818" data-end="1995">В базову конструкцію столу інтегрований нирковий міст (нирковий валик), який значно спрощує маніпуляції з пацієнтом під час урологічних операцій, зокрема втручань на нирках.

<p data-start="1997" data-end="2260">Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою педалі гідравлічного приводу. Нахили ложа в положення Тренделенбург та зворотний Тренделенбург, бокові нахили, а також регулювання висоти ниркового валика виконуються вручну шляхом обертання відповідних рукояток.

<p data-start="2262" data-end="2569">Нахили спинної секції та секцій для ніг регулюються за допомогою пневмопружин німецького виробництва, що забезпечує плавність рухів, точність налаштувань і довговічність механізмів. Секція для голови та секції для ніг є знімними. Налаштування їх положення та відведення ножних секцій здійснюється вручну.

<p data-start="2571" data-end="2744">Положення опор для рук, колін, бокових опор, плечових упорів, а також відкидання лівої та правої ножних секцій регулюється вручну шляхом фіксації у потрібному положенні.

<p data-start="2746" data-end="2886">Оптимально спроєктована основа столу забезпечує високу стабільність конструкції та достатній простір для комфортної роботи хірургічної бригади.

<p data-start="2888" data-end="3087">Операційний стіл "БІОМЕД" МТ600 поєднує у собі рентген-прозорість, ергономіку та механічну надійність, що робить його ефективним рішенням для сучасних операційних блоків будь-якого профілю.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип столу Універсальний (хірургічний), мобільний

Тип приводу Механіко-гідравлічний

Тип ложе Рентген-прозоре, 5-секційне, міст для нирок

Загальна ширина поверхні столу 540 мм

Розміри ложа 2010x500 мм

Висота верхньої частини столу від підлоги 670-970 мм

Діапазон переміщення вгору вниз 300 мм

Тренделенбург 30°

Зворотній Тренделенбург 25°

Бічний нахил ложе вліво 20°

Бічний нахил ложе вправо 20°

Нахил секції для голови вгору 60°

Нахил секції для голови вниз 75°

Нахил секції спинної вгору 80°

Нахил секції спинної вниз 30°

Нахил секцій для ніг вгору 15°

Нахил секцій для ніг вниз 90°

Відведення секції для ніг в сторону 2x90°

Висота моста для нирок (нирковий валик) 0-120 мм

Максимальне безпечне навантаження 180 кг

Діаметр коліс 150 мм

Гарантія 12 місяців

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стіл операційний "БІОМЕД" МТ600 1 шт.

Дуга анестезіологічна 1 шт.

Опора для плечей 2 к-ти

Опора бічна 2 к-ти

Опора під коліна 2 к-ти

Опора для руки 2 к-ти

Секція для голови 1 шт.

Секція для ноги 2 шт.

Опора для стоп ніг. 2 к-ти

Ручка регулювання 1 шт.

Матрац 1 к-т

Інструкція з експлуатації 1 шт.

Комплект ременів За попередньою домовленістю

Пропозиція дійсна на момент формування.