

C20 (BF500F)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 206080 грн

Артикул: F0582

Фетальний монітор БІОМЕД BF500F — модульний КТГ-монітор для комплексного контролю параметрів плода і матері з транспортним модулем, сенсорним екраном і професійним аналізом КТГ



<p data-start="264" data-end="685">Фетальний монітор БІОМЕД BF500F — багатофункціональний фетальний монітор, призначений для комплексного моніторингу життєво важливих фізіологічних параметрів матері та плода в період вагітності, під час пологів і в післяпологовий період. Прилад використовується у пологових будинках, перинатальних центрах, акушерських стаціонарах та відділеннях інтенсивного спостереження.

<p data-start="687" data-end="1111">Монітор BF500F складається з основного фетального блоку багатофункціонального модуля моніторингу матері BM1600. Така конструкція дозволяє здійснювати одночасний контроль параметрів плода і матері, а у разі необхідності — використовувати знімний модуль як повноцінний транспортний монітор для безперервного спостереження за вітальними параметрами матері під час до- та післяпологового транспортування.

<p data-start="1113" data-end="1304">Операційна система BF500F працює на базі ConxOS — спеціалізованої медичної ОС, що забезпечує високу стабільність, безпечність роботи та підтримку багатозадачності в режимі реального часу.

<p data-start="1306" data-end="1543">Основний блок оснащений сенсорним LED-дисплеєм діагоналлю 12,1" з високою роздільною здатністю, широким колірним діапазоном і тривалим терміном служби. Інтерфейс адаптований для швидкої та інтуїтивної роботи медичного персоналу.

<p data-start="1545" data-end="1851">Монітор підтримує використання водонепроникних датчиків ЧСС плода, ЧСС матері, ЧСС ТОКО-датчика та маркера рухів плода, що дозволяє проводити моніторинг навіть під час пологів у воді. Високочутливі датчики ЧСС плода з довгим імпульсом забезпечують точну реєстрацію сигналів у широкому діапазоні клінічних ситуацій.

<p data-start="1853" data-end="2126">Індикація потужності прийнятого сигналу ЧСС плода та перевірка каналів при моніторингу двійні допомагають лікарю максимально точно визначати серцеву активність кожного плода. Універсальні порти датчиків автоматично розпізнаються

та відображаються на дисплеї.

<p data-start="2128" data-end="2342">Передбачені ручний та автоматичний режими підрахунку рухів плода, також вбудовані програми аналізу КТГ за шкалами Фішера, Креббса та NST, що дозволяє комплексно оцінювати стан плода та перебіг вагітності.

<p data-start="2344" data-end="2539">Для зручності введення даних передбачена комп'ютерна алфавітно-цифрова клавіатура. Вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 4400 мА·год забезпечує понад 4 години автономної роботи.

<p data-start="2541" data-end="2920">Монітор оснащений вбудованим термопринтером з шириною паперу (ширина друку 144 мм). Інтелектуальна система Cali-Rec® автоматично коригує напрям паперу, запобігає його застряганню, контролює стан кришки та відображає повідомлення про помилки на екрані.

Для формування повних звітів у форматі А4 можливе підключення зовнішнього лазерного принтера через USB-порт.

<p data-start="2922" data-end="3170">BF500F підтримує підключення до центральної станції моніторингу збереження даних на USB-накопичувач та оновлення програмного забезпечення з зовнішніх носіїв. За потреби монітор може бути оснащений акустичним стимулятором пробудження плода.

<p data-start="3172" data-end="3449">Знімний модуль BM1600 може використовуватися автономно як транспортний монітор пацієнта. Він обладнаний кольоровим сенсорним РК-дисплеєм 4,3 дюйма з режимами «Стандартний екран» та «Екран великих чисел», що робить його зручним для застосування в умовах транспортування.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Основний блок BF500F 1 шт.

Модуль основних параметрів BM1600 1 шт.

Датчик ТОСО водонепроникний 1 шт.

Датчик ЧССП1 водонепроникний 1 шт.

Датчик ЧССП2 водонепроникний 1 шт.

Маркер руху плода водонепроникний 1 шт.

Кабель ЕКГ 3-відведень 1 шт.

Датчик SpO2 для дорослих 1 шт.

Манжета НІАТ для дорослих 1 шт.

Трубка НІАТ 1 шт.

Температурний датчик нашкірний для дорослих 1 шт.

Гель ультразвуковий 1 шт.

Термопапір в пачці 1 шт.

Шнур живлення 1 шт.

Провід вирівнювання потенціалів 1 шт.

Ремінь 1 комплект

Інструкція з експлуатації 1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.